

PAKIET TESTOWY MINI BOWIE-DICK

GETINGE CHECK, STERYLIZACJA PAROWA



▪ **OPIS:**

Getinge Check - pakiet testowy Bowiego-Dicka służy do codziennego monitorowania sterylizatorów parowych ze wstępną próżnią, pracujących w temp. 134 °C. w czasie 3,5 min.
Nr kat. **G.6001155600.**

▪ **NORMA:**

PN-EN ISO 11140-4:2009
(Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki chemiczne -- Część 4: Wskaźniki Typu 2 jako alternatywne do testu typu Bowiego-Dicka do wykrywania penetracji pary wodnej)

Wg normy PN-EN ISO 11140-4:

„Nieprawidłowy wynik testu Bowiego-Dicka jest oznaką potencjalnych problemów ze sterylizatorem, które mogą uniemożliwić skuteczną sterylizację całego wsadu poddawanego procesowi. Niepowodzenie to nie jest dowodem ostatecznym, że błąd w sterylizatorze jest spowodowany zatrzymywaniem powietrza, przenikaniem powietrza lub gazów nie ulegających skropleniu i konieczne może być prześledzenie innych przyczyn niepowodzenia.”

▪ **ZALETY:**

Bez ołowiu i toksycznych metali ciężkich.
Możliwość rejestracji.
Małe wymiary.
Łatwa interpretacja.
Wyraźna zmiana barwy.

▪ **WYNIKI I PRZECHOWYWANIE:**

Po osiągnięciu założonej próżni w sterylizatorze para przedostaje się do karty testowej wewnątrz pakietu i zmienia kolor umieszczonego na niej wskaźnika z fioletowego na jednorodny zielony.

Przechowywać w dostarczonym opakowaniu w temp. 10 - 38 °C, wilgotność względna 10 – 60 %.
Chronić przed wilgocią.
Okres przydatności do użycia na opakowaniu.