

ZESTAW W.MS 300

WIELOFUNKCYJNA WALIDACJA ZGRZEWÓW
OPAKOWANIA PAPIEROWO-FOLIOWE

Zestaw może być używany jako część kwalifikacji operacyjnej (OQ) i kwalifikacji procesowej (PQ) podczas walidacji procesu pakowania przed sterylizacją oraz jako rutynowe badanie po sterylizacji. Zalecany do stosowania raz w tygodniu i gdy istnieje podejrzenie braku szczelności opakowania.

Zestaw spełnia wymagania ISO 11607-1 i ASTM F1929 - testy kontroli wydajności urządzeń zgrzewających i szczelności opakowań sterylizacyjnych oraz ISO 11607-2.

Zestaw MS300 łączy dwa testy w jednym;
codzienny test arkuszowy W.SC250 umożliwiający wizualną ocenę jakości wykonanego zgrzewu oraz
atramentowy test tygodniowy w formie 80 ml butelki z zabarwionym płynem kontrolującym szczelność kanałów zgrzewu.

■ WYKONANIE TESTU TYGODNIOWEGO:

Należy zgrzać arkusz testowy W.SC250 za pomocą zgrzewarki, która jest kontrolowana. Wlać 30-40 kropeł płynu z załączonej butelki do utworzonej „kieszonki”, barwnik powinien pokryć całą długość wykonanego zgrzewu. Odczekać 5 sekund. Na zgrzewie nie może pojawić się żaden wyciek płynu. Udokumentować test na załączonej karcie rejestracyjnej.



■ ZAWARTOŚĆ JEDNEGO OPAKOWANIA:

300 arkuszy testu W.SC250 odwzorowującego typowe opakowanie papierowo-foliowe.
Butelka 80 ml płynu do badania szczelności kanałów zgrzewu.
Stoper.
Karta rejestracyjna do archiwizacji.
Instrukcja użycia.
Całość wystarcza na około jeden rok testów dla jednej zgrzewarki.



nr kat. **W.MS 300**
Opak. 300 szt. + 80 ml

■ PRZECHOWYWANIE:

Zaleca się przechowywanie w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach w suchym miejscu, chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego i wilgoci.