

WSKAŹNIK ZINTEGROWANY MI – TYP 5

STERYLIZACJA PAROWA - GETINGE ASSURED



nr kat. **G.6005500510**

opak. 250 szt.

- **OPIS:**
Wskaźnik zintegrowany MI reaguje na wszystkie zmienne krytyczne procesu sterylizacji parowej. Kontroluje procesy w zakresie temperatur pomiędzy 121 °C i 135 °C. Daje wizualne potwierdzenie, że parametry sterylizacji (czas, temperatura oraz para) zostały spełnione.
- **NORMA:**
PN-EN ISO 11140-1:2015
(Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki chemiczne -- Część 1: Wymagania ogólne).
- **WYNIKI I PRZECHOWYWANIE:**
Podczas procesu granulaty chemiczne topią się i przemieszczają w postaci niebieskiej barwy wzdłuż oznaczonych pól FAIL (błąd) lub PASS (wynik prawidłowy). Różnice w odcieniach niebieskiego paska są normalne i dopuszczalne, o ile niebieska barwa występuje w oknie PASS (wynik prawidłowy).
Przechowywać w dostarczonym opakowaniu w temperaturze pokojowej 10-30 °C, wilgotność względna 10-60 %, z dala od światła, wilgoci i środków utleniających. Okres przydatności do użycia na opakowaniu.

Sterigat Sp. z o.o.

Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa

+48 22 3797160

sterigat@sterigat.pl

www.sterigat.pl