

HELA

pistolet ze stali nierdzewnej do mycia

Pistolet ze stali nierdzewnej Hela firmy HEGA-Medical jest przystosowany do zasilania wodą demineralizowaną, demontowalny w całości bez konieczności użycia narzędzi, zastosowanie wysokiej jakości materiałów umożliwia sterylizację parową pistoletu.

Stożkowa nakrętka ze stali nierdzewnej na końcu pistoletu pozwala na stabilne mocowanie go w stole (przelotka H.5070) lub do ściany (uchwyt nylon H.3000).

Standardowo pistolet dostarczany jest z węzłem ze stali nierdzewnej o dł. 1,5 m (lub 3,0 m) i przyłączem do wody 1/2" (lub 3/4"). Pistolet dostępny również ze standardowym węzłem z PVC.

- HELA bez końcówek, nr kat. H.9051
- HELA z kompletem 6 końcówek, nr kat. H.9050



1 2 3 4 5 6



Wykaz końcówek – każdą można zamówić indywidualnie		
Nr kat.	Opis	
1	H.1115	Końcówka do czyszczenia węży z PVC lub ze stali nierdzewnej
2	H.1040	Szpiczasta końcówka do czyszczenia zaworów
3	H.1120	Złącze Luer dla strzykawk i kaniul z podłączeniem typu Luer
4	H.1125	Końcówka Record dla strzykawk i kaniul ze stożkową końcówką record
5	H.1130	Końcówka do czyszczenia drenów
6	H.5055	Dysza rozpylająca do czyszczenia szkła oraz powierzchni
	H.9052	Komplet 6 końcówek na listwie kątovej ze stali nierdzewnej

Cały pistolet można łatwo rozmontować na części bez konieczności stosowania narzędzi. Wąż odłączamy poprzez odkręcenie nakrętki stożkowej. Po jej zdjęciu można wyjąć z pistoletu stabilny termicznie uchwyt. Po odkręceniu zamykającej nakrętki można wyjąć całą jednostkę dozującą.



Nr kat.	Opis
1	H.3000 Uchwyt do pistoletów montowany do ściany – czarny nylon
2	H.5070 Przelotka do zamontowania pistoletów w blacie stołu (średnica 34-40 mm, grubość blatu do 50 mm)
3	H.3020 Wieszak z 1 haczykiem

Sterigat Sp. z o.o.

Biurowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa, tel. + 48 22 379 71 60, e-mail: sterigat@sterigat.pl

STERIGAT 10.2024 Niniejszy materiał nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, zdjęć, grafik zawartych w tym materiale w formie elektronicznej i innej bez zgody autora zabronione pod rygorem odpowiedzialności karnej